



Vibratore per tamponi orali **TALKTOOLS**[®]

Riferimento TT-1541

L'originale **Vibratore per tamponi orali** di **TALKTOOLS**[®] è uno strumento eccellente per diagnosticare i deficit sensomotori, promuovere la consapevolezza della cavità orale. È comunemente usato dai terapeuti quando iniziano la terapia, come attività sensoriale che favorisce la tolleranza alla manipolazione o il posizionamento di strumenti in bocca.

A cosa serve?

Utilizza il **Vibratore per tamponi orali** **TALKTOOLS**[®] per:

- diagnosticare i deficit senso-motori,
- promuovere la consapevolezza propriocettiva del cavo orale
- stimolare la propriocezione del cavo orale
- consente di diagnosticare ipersensibilità, iposensibilità, difensività tattile, ecc.



Come strumento terapeutico

Può aiutare a migliorare la reattività alle informazioni sensoriali, all'esterno e all'interno del cavo orale, facilitando l'allenamento all'alimentazione e della fono-articolazione.

Risorsa di particolare interesse nei casi di disturbi dell'integrazione sensoriale, aspetti che possono ostacolare il posizionamento del cibo nella cavità orale, la deglutizione, la masticazione, la parola, ecc.

Come strumento diagnostico

Può rivelare ipersensibilità, iposensibilità e difesa tattile ..., condizioni che possono interferire con il posizionamento orale, l'alimentazione e la riabilitazione logopedica.

Come funziona? Istruzioni:

1. Rimuovete il coperchio che si trova sulla parte posteriore del dispositivo premendo con il pollice e facendolo scivolare nella direzione indicata.
3. Inserite nel dispositivo due pile AAA (non incluse) facendo corrispondere le polarità come indicato nel vano pile.
4. Rimettete il coperchio facendolo scivolare fino alla chiusura completa.
5. Inserite il bastoncino del tampone nel foro presente sulla punta del dispositivo.
6. Per ottenere la rotazione del tampone premere e tenere premuto il bottone di accensione.

Rimuovere le batterie in caso di non utilizzo prolungato. Non utilizzare insieme pile vecchie e nuove o pile di tipo diverso. In caso di perdita di elettroliti dalle pile, rimuovere il liquido dal vano pile e sostituire le pile.

Il Vibratore per tamponi orali TALKTOOLS® non è un giocattolo, deve sempre essere usato da un professionista o un adulto addestrato al suo utilizzo.



Quali tamponi utilizzare?



Con il **Vibratore per tamponi orali TALKTOOLS®** potete utilizzare svariate tipologie tamponi usa e getta aromatizzati alla menta, lampone, limone o gusto neutro, imballati singolarmente che potete acquistare comodamente su **GiocoTherapy**.

Contenuto:



- 1 **Vibratore per tamponi orali TALKTOOLS®**
- 20 tamponi
- libretto di istruzioni originale di **TALKTOOLS®**



CONTRO INDICAZIONI:

- ⚠ **NON** utilizzare questo strumento con pazienti a cui sono stati diagnosticati disturbi convulsivi stimolati dalle vibrazioni.
- ⚠ Questi strumenti sono destinati all'uso esterno con la supervisione di un adulto.
- ⚠ Il **Vibratore per tamponi orali TalkTools** non è masticabile.
- ⚠ Disinfettate esteriormente dopo utilizzo con disinfettanti spray e senza immergerlo in acqua o prodotti liquidi.

DECLARATION OF CONFORMITY

- Toy Safety Directive 88/37/EEC and 2009/48/EC
- EN 71 Part 1 – Mechanical and Physical Properties
- EN 71 Part 2 – Specification for Flammability Requirements
- EN 71 Part 3 – Specification for migration of certain elements
- Regulation No 1907/2006 – REACH
 - Annex XVII, Entry 23 Total Cadmium
 - Annex XVII, Entry 51 & 52 Phthalates
 - Annex XVII, Entry 50 PAH's



Senza BPA, senza PVC e senza ftalati

Distributore autorizzato per Italia

Prodotto **TALKTOOLS®** realizzato in Cina

www.giocoTherapy.it



Importato da USA