

DISPOSITIVI A VIBRAZIONE ORO FACCIALE

TALKTOOLS® Jiggler™

DRAGO - RANA - UNICORNO - BRADIPO

Riferimento TT-20522

I dispositivi a vibrazione **JIGGLER™** di **TALKTOOLS®** sono progettati per aumentare la consapevolezza sensoriale nei muscoli della mascella e delle labbra, ridurre la rigidità o la tensione nei muscoli della mandibola, e / o stimolare l'articolazione temporo-mandibolare (ATM).

Dani il Drago



Freddy la Rana



Uni l'Unicorno



Sammy il Bradipo



Obiettivi terapeutici dell'Unicorno:

OBIETTIVO n. 1 ridurre la tensione muscolare oro-facciale, stimolare l'articolazione temporo-mandibolare (ATM)

OBIETTIVO n. 2: migliorare la chiusura delle labbra e la retrazione linguale prima dell'introduzione di esercizi sui gruppi muscolari (orbicolare, temporale ...), alimentazione e linguaggio.

- facilitare le funzioni alimentari - alimentazione con cucchiaio, bere con la tazza
- OPT – esercizi soffio con fischietti a beccuccio piatto e abbassalingua (per tonificare le labbra)
- indurre movimenti fonoarticolatori : /m /b/ /p/

OBIETTIVO n. 3: introdurre l'alimentazione con il cucchiaio per tutti i pazienti (compresi quelli con avversioni orali)



Obiettivi terapeutici del Bradipo:



OBIETTIVO n.1: ridurre la tensione muscolare oro-facciale, stimolare l'articolazione temporo-mandibolare (ATM)

OBIETTIVO n.2: Migliorare la consapevolezza sensoriale nei muscoli della mascella e delle labbra, prima dell'introduzione di esercizi sui gruppi muscolari (orbicolare, temporale...)

- Facilitare le funzioni alimentari - alimentazione con cucchiaio
- OPT – esercizi di soffio con fischietti con beccuccio piatto
- -esercizi con l'abbassalingua
- Indurre movimenti fonoarticolatori - /m/ /b/ /p/

OBIETTIVO n. 3: migliorare l'arrotondamento delle labbra.

- Alimentazione - Bere con la cannuccia
- OPT - Soffia bolle e fischietti con il beccuccio tondo
- Indurre movimenti fonoarticolatori : - /oo/ /oh/ /w/

Obiettivi terapeutici della rana:

OBIETTIVO n. 1 ridurre la tensione muscolare oro-facciale, stimolare l'articolazione temporo-mandibolare (ATM) prima dell'introduzione di esercizi sui gruppi muscolari (orbicolare, temporale ...)

OBIETTIVO n.2: Aumentare la consapevolezza sensoriale, utilizzando una superficie liscia, nei muscoli della mascella e delle labbra.

- Facilitare le funzioni alimentari - alimentazione con cucchiaio e bere con la tazza
- OPT – esercizi di soffio con fischietti con beccuccio piatto, esercizi con abbassalingua per la chiusura delle labbra
- Indurre movimenti fonoarticolatori : - /m/ /b/ /p/

OBIETTIVO n. 3: migliorare l'arrotondamento e la sporgenza delle labbra.

- Facilitare le funzioni alimentari - Bere con la cannuccia
- OPT – esercizi per il soffiare: bolle e fischietti a bocca tonda
- Indurre movimenti fonoarticolatori : - /oo/ /oh/ /w/ /r/ /sh/ /ch/



Obiettivi terapeutici del drago:



OBIETTIVO n.1: Aumentare la consapevolezza sensoriale.

OBIETTIVO n. 2: migliorare l'arrotondamento delle labbra e la retrazione linguale.

- Facilitare le funzioni alimentari - Bere con la cannuccia
- OPT - Soffia bolle di sapone e fischietti con beccucci tondi
- Indurre movimenti fonoarticolatori : /oo/ /oh/ /w/


OBIETTIVO n. 3: migliorare l'arrotondamento e la protrusione delle labbra utilizzando le piccole protuberanze presenti sul Drago nei pazienti che necessitano di input sensoriali aggiuntivi.

- Facilitare le funzioni alimentari - bere con la cannuccia
- OPT - Soffiare bolle di sapone e fischietti con beccucci tondi
- Indurre movimenti fonoarticolatori : - /oo/ /oh/ /w/ /r/ /sh/ /ch/

CONTRO INDICAZIONI:

- ✚ NON utilizzare questo strumento con pazienti a cui sono stati diagnosticati **disturbi convulsivi stimolati dalle vibrazioni**.
- ✚ Questi strumenti sono destinati all'uso esterno con la supervisione di un adulto.
- ✚ I **JIGGLER** non sono masticabili.

Richiede 2 batterie AA NON incluse.

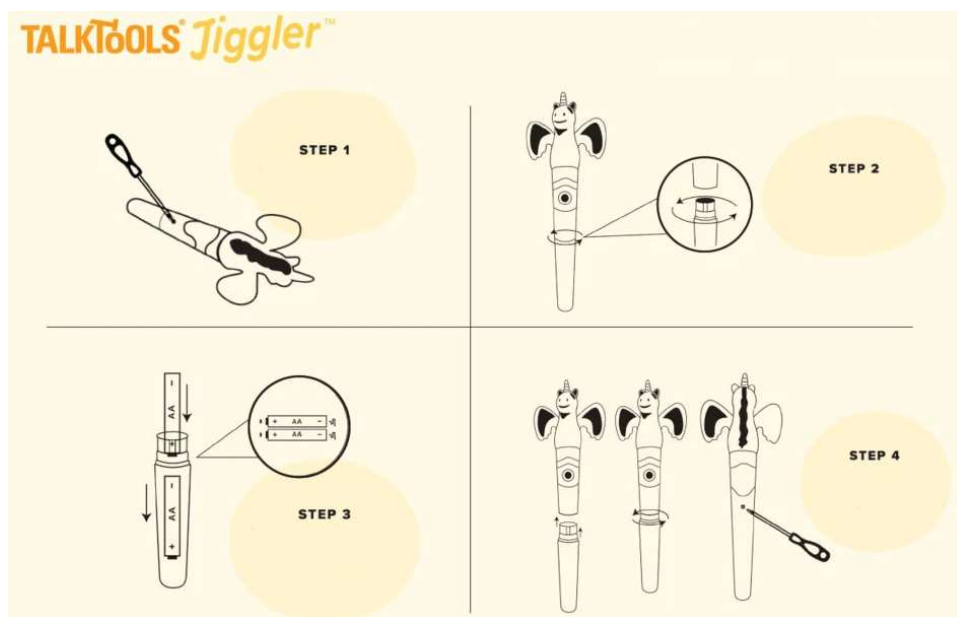

Istruzioni:

1. Con un cacciavite svitate la piccola vite che si trova sulla parte posteriore del dispositivo.
2. Tenete con una mano il manico del dispositivo, utilizzate l'altra mano per svitare il Jiggler con un movimento antiorario.
3. Inserite nel manico due pile AA facendo corrispondere le polarità sulle pile e nel vano pile.
4. Rimontate il Jiggler e avvitate la vite sul dorso del manico.

Rimuovere le batterie in caso di non utilizzo prolungato. Non utilizzare insieme pile vecchie e nuove o pile di tipo diverso. In caso di perdita di elettroliti dalle pile, rimuovere il liquido dal vano pile e sostituire le pile.

Jiggler™ di TalkTools® non è un giocattolo, deve sempre essere usato da un professionista o un adulto addestrato al suo utilizzo.

PRODOTTO TALKTOOLS



www.giocoTherapy.it