

Flauto Nasale

Riferimento TT- TT-1061



Il Flauto Nasale è uno dei migliori strumenti per facilitare il flusso d'aria nasale, parte integrante della riabilitazione dell'insufficienza velo-faringeo con un successivo miglioramento della qualità del linguaggio.

Come suonare il flauto nasale

Posizionare la parte piccola arrotondata del flauto nasale sotto le narici e quella più grande contro le labbra. Tenete la bocca aperta e premete bene (sigillate) il flauto nasale contro la pelle. (Se non si posiziona correttamente, si potrebbe produrre qualche suono divertente ma certamente non melodie). Quindi, con la bocca siate pronti a dire, per esempio, "ah", ma senza dirlo; e respirate delicatamente attraverso le narici. O anche preparatevi a dire "Eeeee" e respirate per produrre un nuovo suono. In poco tempo sarete in grado di regolare la bocca e la gola per produrre i suoni di cui avete bisogno. Sfregando un dito sopra il piccolo foro rotondo nella parte inferiore della scanalatura all'altezza del naso è possibile produrre un leggero tono vibrato.



Obiettivi terapeutici:

per pazienti con insufficienza velo faringea, disfonia consente di lavorare sul rinforzo della muscolatura orale (in modo da poter permettere il sollevamento del velo e quindi la chiusura del rinofaringe ed eliminare la fuoriuscita dell'aria dal naso), migliorare l'utilizzo della funzionalità del velo durante l'articolazione dei vari fonemi.

Realizzato in plastica, lavabile in lavastoviglie.

Consigliamo l'utilizzo individuale. Disinfettare prima di ogni utilizzo.

PRODOTTO TALKTOOLS



www.giocoTherapy.it